


Bittium Spánková apnoe

Návod

Obsah balení


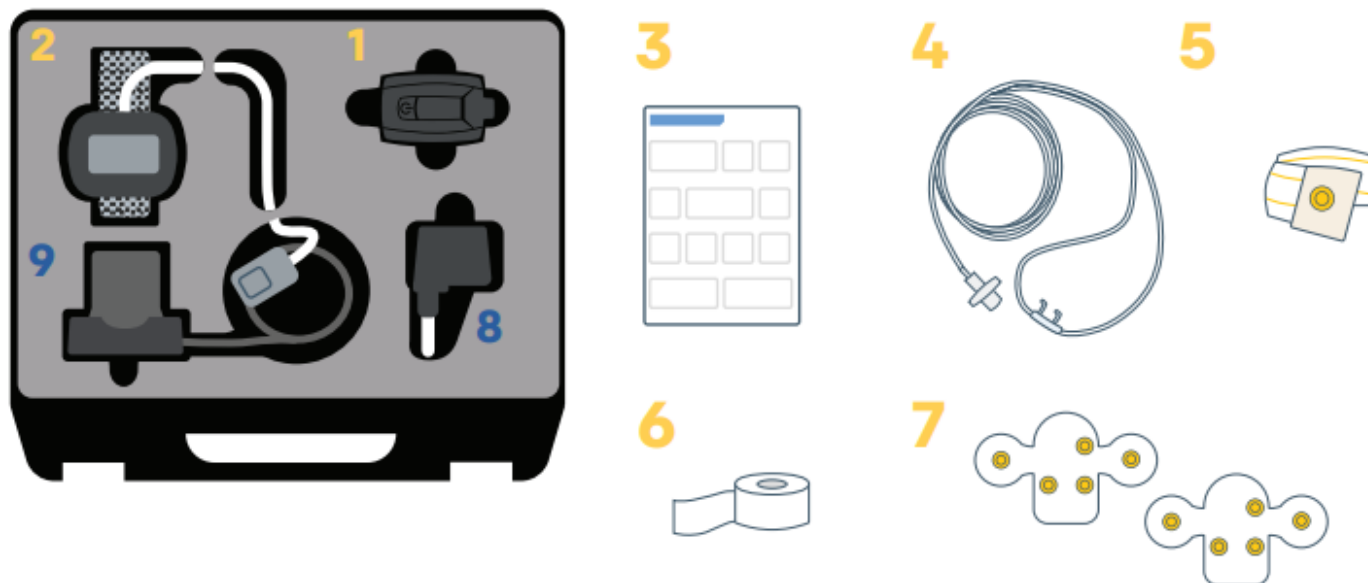


Vybavení potřebné na monitorování:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Bittium RespiroTM | 6. Tejpovací náplast |
| 2. Pulzní oxymetr | (není součástí balíčku, použijte náplast) |
| 3. Návod / Poznámky | 7. RespiroTM elektroda na RIP opasek |
| 4. Nosová kanyla | |
| 5. RIP opasek | |

8. Nabíječka není součástí balíčku, přístroj je plně nabitý.
9. Odpovědní obálka s podacím lístkem pro zpětné odeslání poštou.

Spuštění monitorace

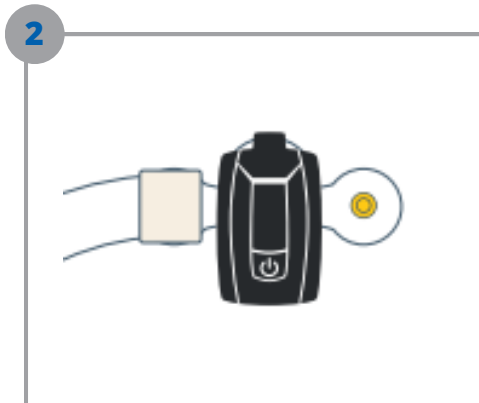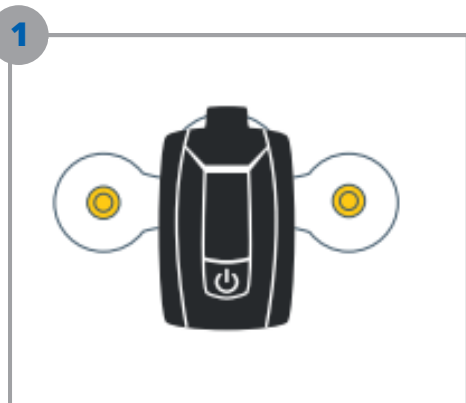


Připojená elektroda k RIP opasku.




Opasek s přístrojem si nasadíte na hrudník dle obrázku.

4

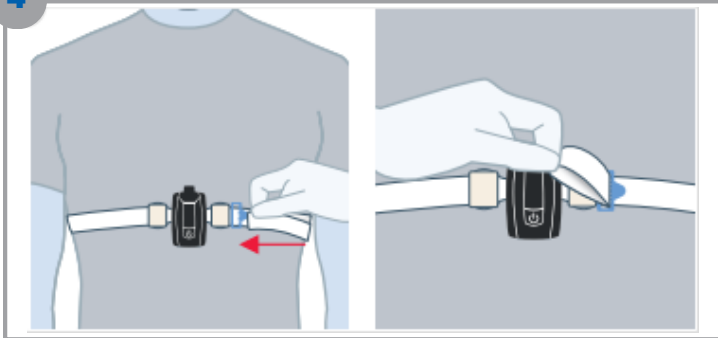


Když je opasek volný, utáhněte jej dle potřeby.

5

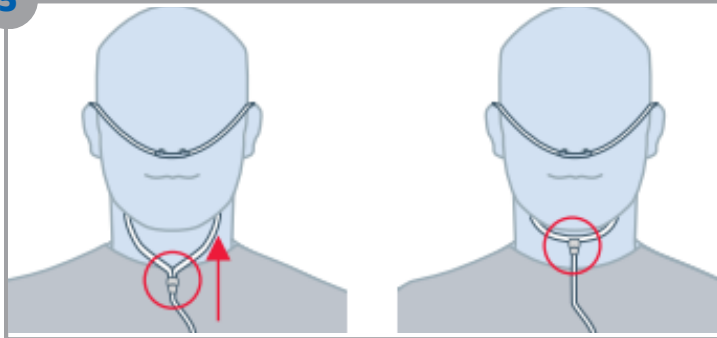


- Nasadte kanylu a upravte na obličej dle potřeby (viz obrázek).
- **Pozor hrozí nebezpečí udušení!**

6

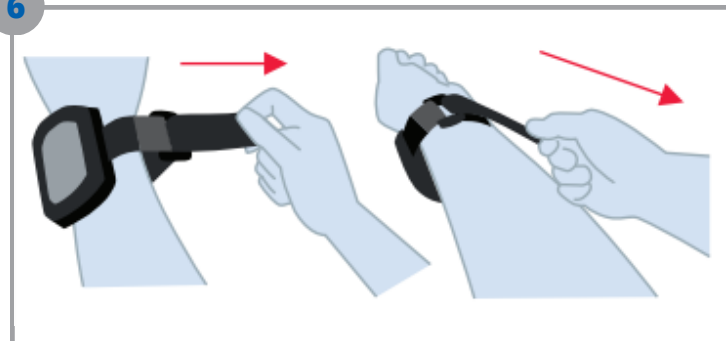


Na zápěstí si nasadte pulzní oxymetr.

7

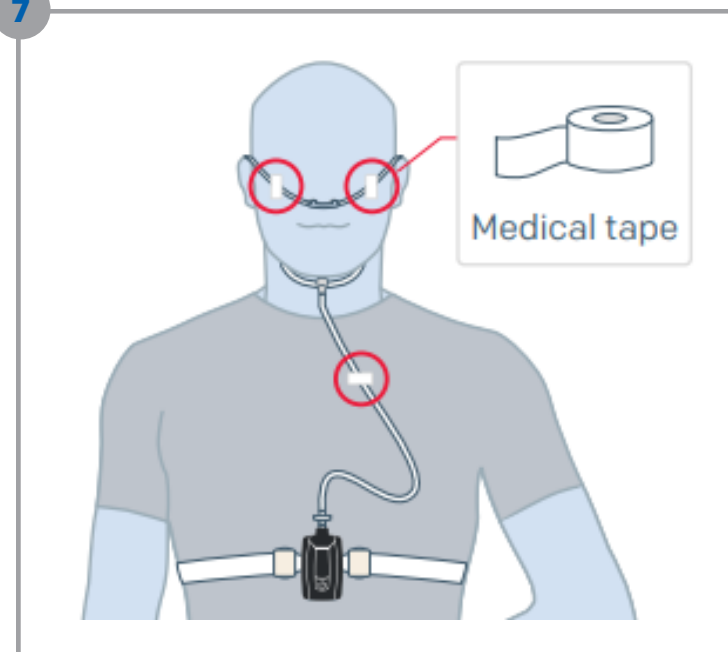


Dle potřeby použijte náplast/tejp na upevnění kanyly.

8

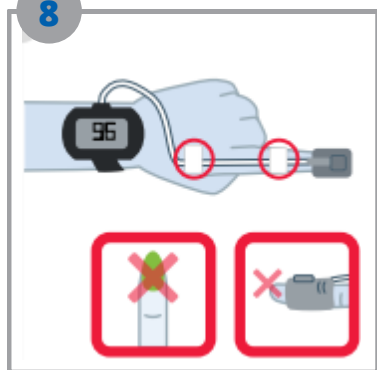


Vložte prst do senzoru.

9

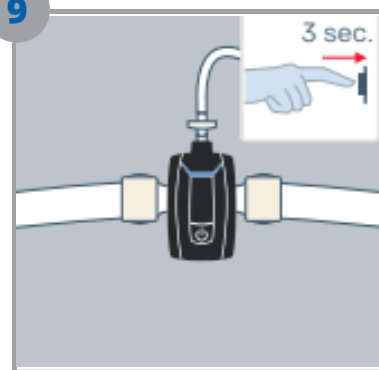


Zapnutí přístroje: stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund, LED indikátor se rozsvítí modře. **Zapnutím přístroje se nezahájí monitorace, zahájení měření v dalším kroku.**

10

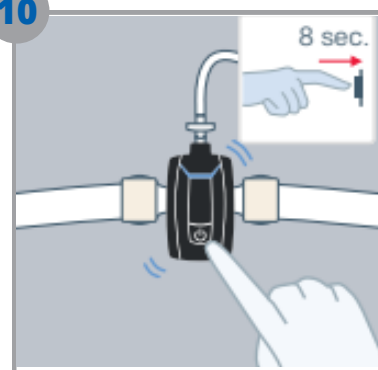


Zahájení měření: stiskněte tlačítko znovu **po dobu 8 sekund, držte to do doby, kdy přístroj zavibruje** a začne blikat modře.

11

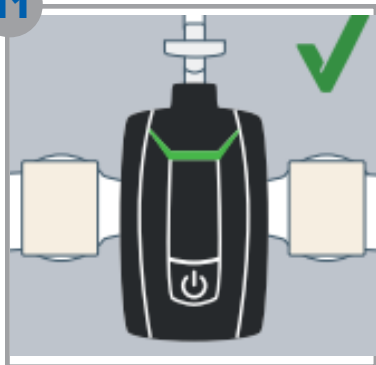

- Když přístroj svítí zeleně, vše proběhlo v pořádku a začíná monitorace.
- Přístroj automaticky přestane svítit do 30 sekund (neznamená to vypnutí přístroje, jen úsporný režim).


12

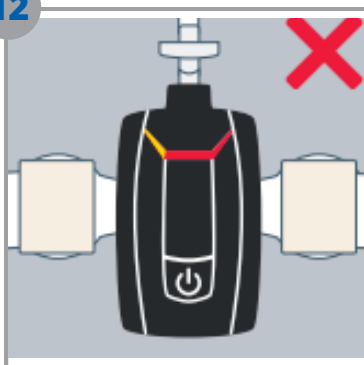

- Když přístroj svítí červeně nebo žlutě, zkontrolujte jestli je vše připojené správně.
- Vysvětlení naleznete v kapitole LED indikátory.

Ukončení monitorace


1

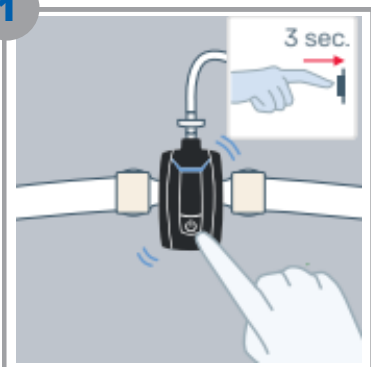


- Podržte tlačítko po dobu 3 sekund - přístroj 3x zavibruje, všechny LED indikátory se rozsvítí modře.
- Pulzní oxymetr se automaticky vypne po vyjmutí z prstu.
- LED dioda svítí modře ještě cca 5 minut (následně automaticky zhasne).

LED indikátory

Když LED indikátor svítí červeně/žlutě, zkontrolujte zapojení všech částí přístroje.

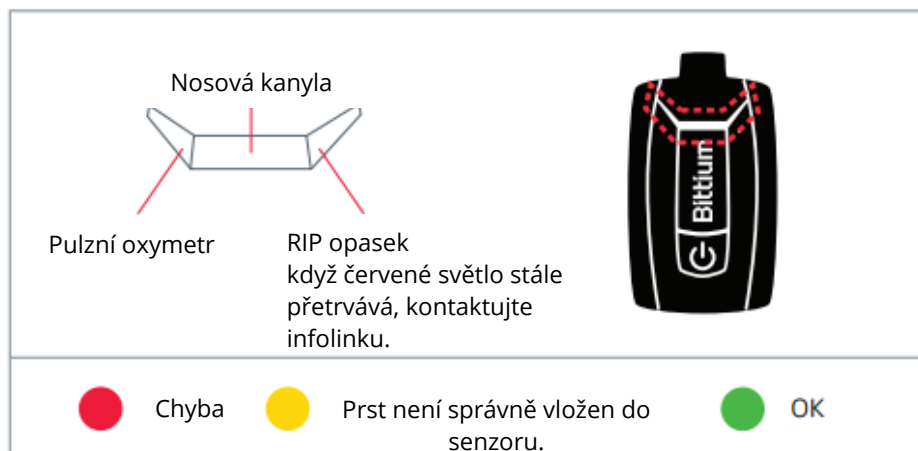

Příklad

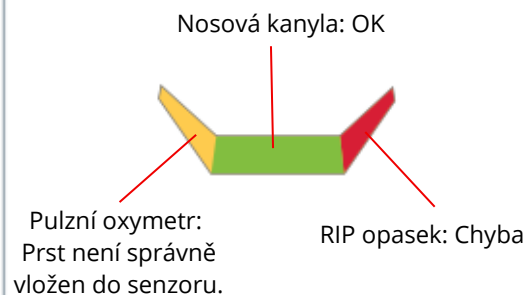

V případě nejasností kontaktujte infolinku: +420 514 514 480.