



Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz



videonávod



CZ

Návod

a důležité informace pro použití

06_24

Dlouhodobý EKG záznamník
Vivalink (4 denní / 7 denní verze)



Vážená paní, Vážený pane,
příložený EKG záznamník Vivalink je určený pro
dlouhodobé neinvazivní monitorování Vašeho
srdečního rytmu.

Získané EKG záznamy pomůžou stanovit příčinu
Vašich obtíží nebo ověří dlouhodobý efekt
zákroku, který jste podstoupil(a). To je klíčové
pro Vaši další úspěšnou léčbu.

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod
a při jakýchkoliv pochybnostech nás neváhejte
kontaktovat na tel.:

+420 514 514 480

Důležitá upozornění před spuštěním-aktivací záznamníku

- | EKG záznamník před nasazením nabijte a následně jej **nasadte nejpozději do 24 hodin od obdržení zásilky.**
- | Chraňte záznamník i telefon proti poškození!
- | EKG monitorace **není** možná současně s hospitalizací či pobytem v lázních. V případě náhlé hospitalizace je nutné EKG monitoraci ukončit. V tom případě EKG záznamník sundejte a kontaktujte (telefonicky či emailem) MDT Centrum.
- | Kdykoliv je potřeba vyměnit nálepkou (např. při jejím odpadnutí nebo vybití EKG záznamníku) je nutné před nasazením nové patch **vždy** dobít EKG záznamník!
- | Nikdy nesundávejte nálepkou před vybitím EKG záznamníku!
- | V případě potřeby dalších nálepek Vám budou poslány za dodatečný poplatek.
- | Využijte dobu spánku k dobíjení mobilního telefonu.

Sprcha a hygiena:

- ! EKG záznamník je voděodolný. Při sprše nálepku neodlepujte!
- ! Vyhněte se dlouhému koupání a sprchování v horké vodě/sauně.
- ! Udržujte záznamník mimo dosah silného proudu vody. Rychlé osprchování je v pořádku.
- ! Vyhněte se mydlení a parfémování v okolí nalepeného záznamníku.



Nasazení EKG záznamníku Vivalink

krok 1 Před nasazením a nalepením nejdříve dobijte EKG záznamník

Záznamník vložte do nabíječky a plně dobijte (viz strany 9–10 nabíjení).

EKG záznamník neobsahuje žádné tlačítka, nemačkejte a neohýbejte ho.

krok 2 Zapnutí mobilního telefonu

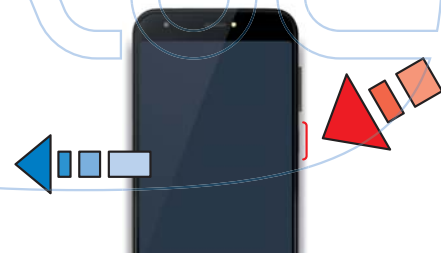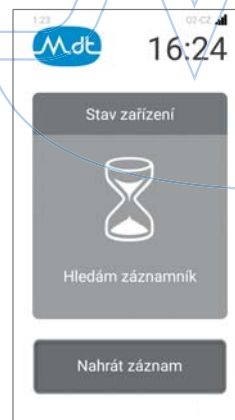

Mobilní telefon zapněte stlačením bočního tlačítka.

Po chvíli se objeví základní obrazovka aplikace.

krok 3 Potvrzení zahájení monitorace

Mobil se po krátké chvíli (max. 2 minuty) spojí s EKG záznamníkem a spárování je úspěšně dokončeno. Stav telefonu

Hledám záznamník


se změnil na **Vše funguje**.

Monitorace je tímto zahájena.

V případě nepřipojení záznamníku k telefonu ani po 2 minutách je potřeba 6krát potukat na logo MDT na obrazovce telefonu.


Tím se spustí manuální inicializace párování a pokus o vzájemné spojení se opakuje.

V případě, že se po chvíli stav **Vše funguje** nezobrazí, kontaktujte naše MDT centrum.

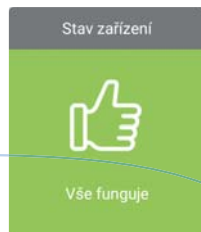

krok 4 Nalepení elektrody/nálepky na EKG záznamník


Vytáhněte nálepku z obalu. Sejměte krycí **fólii s číslem 1** z nálepky a přilepte nálepku na EKG záznamník tak, aby 3 elektrody EKG záznamníku byly v kontaktu se 3 gelovými plochami na nálepce (spojíte 2 ploché strany) viz obrázky.

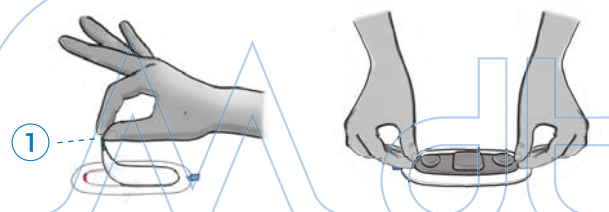

Správně nalepená nálepka na záznamníku:



pohled
z vrchu

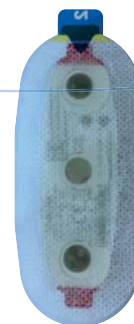


pohled
zespodu

krok 5 Nalepení nálepky na tělo pacienta

- I Připravte si místo aplikace EKG záznamníku podle obrázku (levá horní část hrudníku), před nalepením musí být pokožka suchá, čistá, případně oholená.
- I Sejměte krycí **fólii číslo 2** a připevněte nálepku se záznamníkem podle následujících obrázků na hrudník (srdíčko na záznamníku směřuje hrotem směrem k břichu).
- I Po nalepení pevně přitlačte okraje nálepky na tělo



Po přilepení EKG záznamníku na pokožku se začne automaticky nahrávat EKG záznam.

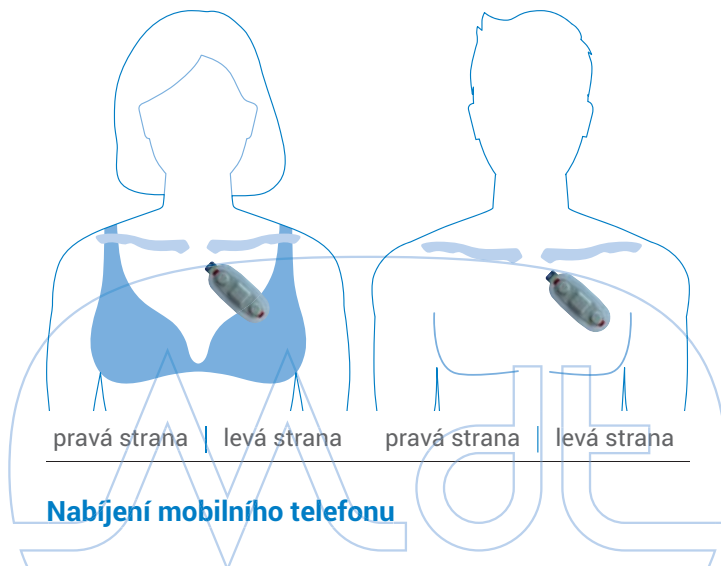

Pro bezchybný provoz je nezbytné udržovat mobilní telefon neustále v nabitém stavu. Proto jej doporučujeme pravidelně nabíjet, min 1× za den.


Přibližný stav baterie telefonu se zobrazuje na jeho displeji. Dobijte telefon vždy, když se na jeho displeji objeví **toto upozornění**:




Nabíjení EKG záznamníku a výdrž baterie

Přibližná výdrž baterie EKG záznamníku se zobrazí na displeji mobilního telefonu. Dobijte záznamník pokaždé, když se na displeji mobilního telefonu objeví upozornění **Nabíjte záznamník, výdrž asi 4 hodiny**

Záznamník odlepte z hrudníku pomocí žlutého úchytu na nálepce

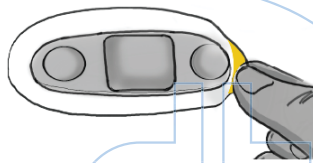

Při nabíjení je potřeba záznamník odlepit od nálepky (začněte odlepovat od kraje a pokračujte opatrně po celé délce bez přílišného ohýbání)

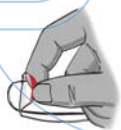

Poté je třeba záznamník jemně očistit od lepidla a gelu, vložit do nabíjecího pouzdra a připojit k nabíječce. EKG záznamník se automaticky vypne, dojde k dočasnému přerušení monitorace a začne se dobíjet.


Záznamník je při nabíjení nutné vložit do nabíjecího pouzdra přesně podle obrázku (nabíjecí kontakty se musí spojit se záznamníkem)



BÍLÁ
Probíhá nabíjení



ZELENÁ
Nabíjení dokončeno

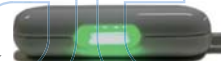

Po skončení nabíjení EKG záznamník vytáhněte z nabíjecího pouzdra, odpojte od nabíječky a pro pokračování monitorování postupujte jako při spuštění od kroku 2.

Použijte novou nálepku

Výdrž baterie EKG záznamníku je cca 4 dny (pro 4 denní verzi), nebo až cca 7 dní (pro 7 denní verzi)

Ukončení monitorace

- I Pro ukončení monitorace Vás budeme telefonicky kontaktovat.
- I Po ukončení je potřeba vypnout mobilní telefon stlačením tlačítka pro vypnutí/zapnutí na jeho pravém okraji.
- I EKG záznamník opatrně odlepte od nálepky. V žádném případě nepoužívejte pinzetu, nůžky ani žádné další ostré nebo kovové předměty, **hrozí poškození přístroje!**
- I Všechny komponenty vložte zpět do balíčku a v pečlivě zalepené přiložené odpovědní obálce podejte na České poště k přepravě.

Prosím pozorně si přečtete pokyny a pokud budete mít i po přečtení pokynů pochybnosti, neváhejte telefonicky kontaktovat naše MDT centrum:

+420 514 514 480